



TROUSSE DE SECOURS INDIVIDUELLE ÉLAGUEUR

Réf. ELA 3570 TP

- Kit coussin hémostatique
- Paire de ciseaux
- Paire de gants jetables
- Lot de 3 pinces à tiques
- Livret 1^{ers} soins



KIT COUSSIN HÉMOSTATIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Contenant un coussin, cousu sur une bande élastique de contention, ainsi qu'une paire de gants, ce produit est destiné à se substituer à la compression manuelle. Il permet d'arrêter une hémorragie.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer l'emballage et mettre les gants avant de pratiquer la pose du coussin
2. Dérouler la bande et poser la compresse sur la plaie
3. Enrouler la bande autour du membre
4. Fixer la grâce au système de fixation auto adhésif



PAIRE DE CISEAUX

Existent en 12 cm, en 15 cm

Ils permettent de découper les pansements, compresses, bandes. Ils peuvent être nettoyé et désinfecté avec une solution alcoolisée.



PAIRE DE GANTS JETABLES


(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la protection du soigneur.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir les gants
3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées

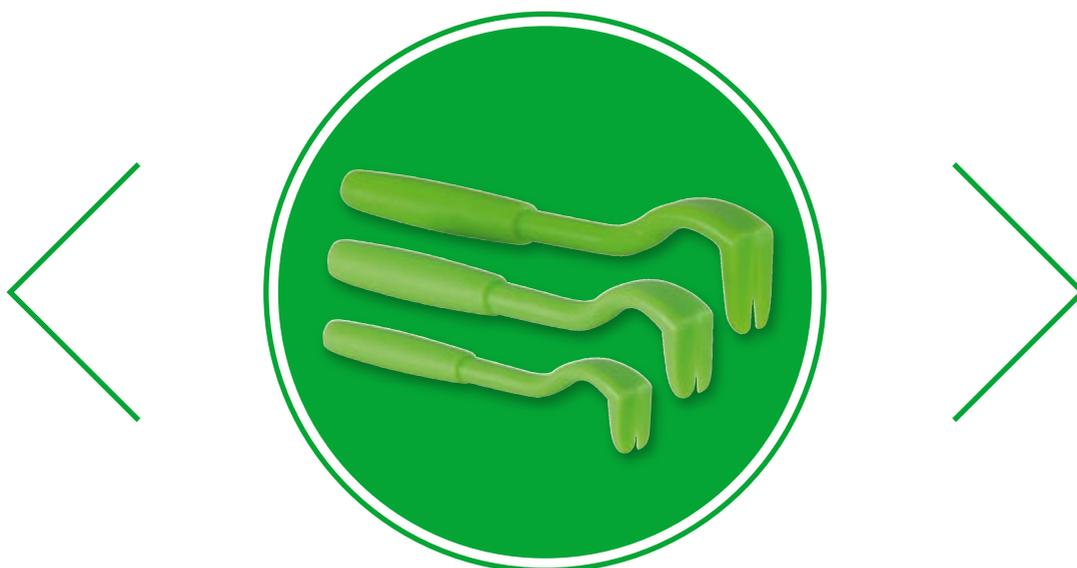

LOT DE 3 PINCES À TIQUES

Permet de retirer les tiques complètement de manière efficace et sans douleur, sur les animaux et les hommes

Elle peut être nettoyée et désinfectée avec une solution alcoolisée.

MODE D'EMPLOI :

1. Insérer le crochet sous le corps de la tique
2. Ne pas tirer, mais **TOURNER** jusqu'à ce que la tique se détache



LIVRET 1^{ers} SOINS

Ce livret, en 10 langues, permet de savoir ce qu'il faut faire en cas d'urgence, et contient tous les numéros utiles.