

# KIT

## DE 100 PANSEMENTS DÉTECTABLES EN PLASTIQUE BLEU ET 1 PULVÉRISATEUR DE CHLORHEXIDINE



Réf. KIT 8001 PB

- Pansements adhésifs bleus en tissu élastique
- Pulvérisateur de 50 ml d'une solution à base de chlorhexidine



## PANSEMENTS ADHÉSIFS BLEUS EN TISSU ÉLASTIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 19 x 72 mm, 18 x 2 cm,  
75 x 46 mm "Bouts de doigts",  
75 x 38 mm "Articulations", Croix "Jointure"

Sous emballage individuel, ils contiennent une compresse non adhérente à la plaie fixée sur une base tissu. De couleur bleue, ils possèdent un film métallique sous la compresse, qui permet un repérage immédiat par les détecteurs de métaux. Ils permettent la protection des petites plaies préalablement nettoyées ou désinfectées.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Enlever les protections plastiques
4. Apposer la compresse sur la partie à protéger
5. Fixer les 2 cotés adhésifs



## **PULVÉRISATEUR DE 50 ML D'UNE SOLUTION À BASE DE CHLORHEXIDINE**

(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Solution nettoyante et assainissante cutanée à action immédiate. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Contenu pouvant réaliser jusqu'à 300 applications.

### **MODE D'EMPLOI :**

1. Enlever le capuchon
2. Pulvériser directement sur l'endroit à traiter
3. Enlever l'excédent avec une compresse