



TROUSSE DE SECOURS SPÉCIALE VÉHICULE INDIVIDUELLE

Réf. MAN 3065 TP

- Couverture de survie
- Éthylotest chimique à usage unique
- Pansements adhésifs
- Compresse imprégnée de solution à base de chlorhexidine



COUVERTURE DE SURVIE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, cette couverture, réalisée en polyester métallisé, protège de la chaleur (coté argenté à l'extérieur) et du froid (coté doré à l'extérieur).

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

Sortir la couverture de son emballage et envelopper la personne :

- Dans le coté doré (argenté vers l'extérieur) pour la protéger de la chaleur
- Dans le coté argenté (doré vers l'extérieur) pour la protéger du froid



ÉTHYLOTEST CHIMIQUE À USAGE UNIQUE

L'éthylotest CONTRALCO est un éthylotest chimique à usage unique qui mesure le taux d'alcool contenu dans l'air expiré d'une personne. L'éthylotest indique si ce taux d'alcoolémie est supérieur ou inférieur au seuil pour lequel l'appareil est calibré. La valeur de ce seuil est mentionnée sur la notice et sur l'emballage extérieur.

Attendre 10 min après la dernière ingestion d'alcool ou d'autres substances (spray, médicaments...) avant d'effectuer un test. L'alcoolémie maximale est atteinte 45min à 60min après le dernier verre d'alcool.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir le sachet scellé et sortir le ballon
2. Sortir le tube
3. Percuter en pressant les deux côtés
4. Gonfler le ballon en une seule fois
5. Insérer le tube sur le ballon
6. Dégonfler entièrement le ballon en 15 secondes environ puis retirer le tube
7. Prendre le tube dans la main, et garder le tube en main selon la durée indiquée par la couleur de la pastille sur le ballon : Blanc : 1min - Rouge : 3min
8. Bien lire le résultat

OUVREZ LA MAIN ET REGARDEZ IMMÉDIATEMENT LES CRISTAUX !

• Coloration ROUGE = **POSITIF** : alcoolémie > 0,25 mg/L d'air.

VOUS NE DEVEZ PAS CONDUIRE.

• Pas de coloration ROUGE = **NÉGATIF** : alcoolémie < 0,25 mg/L d'air.



PANSEMENTS ADHÉSIFS

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 20 x 72 mm, 53 x 70 mm, 10 x 6 cm,
1 m x 6 cm, "Bouts de doigts"

Sous emballage individuel, ils contiennent une compresse non adhérente à la plaie fixée sur une base non tissé multi extensible. Ils permettent la protection des petites plaies, préalablement nettoyées ou désinfectées.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Enlever les protections plastiques
4. Apposer la compresse sur la partie à protéger
5. Fixer les 2 cotés adhésifs



COMPRESSE IMPRÉGNÉE D'UNE SOLUTION À BASE DE CHLORHEXIDINE

(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Compresse douce imprégnée d'une solution nettoyante et assainissante cutanée à action immédiate. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter