



VALISE DE SECOURS TAXI

Réf. TAX 2270 PP

- Couverture de survie
- Sacs vomitoires
- Compresse de gaze
- Pansement absorbant stérile américain
- Bandes de crêpe
- Compresse imprégnée de solution à base de chlorhexidine
- Paire de ciseaux
- Paire de gants jetables



COUVERTURE DE SURVIE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, cette couverture, réalisée en polyester métallisé, protège de la chaleur (coté argenté à l'extérieur) et du froid (coté doré à l'extérieur).

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

Sortir la couverture de son emballage et envelopper la personne :

- Dans le coté doré (argenté vers l'extérieur) pour la protéger de la chaleur
- Dans le coté argenté (doré vers l'extérieur) pour la protéger du froid



SACS VOMITOIRES

Prêt à l'emploi ce sac vomitoire, hygiénique, permet l'absorption ultra rapide du vomi grâce à son tampon situé au fond du sac. Sa conception permet également de protéger à 100 % les mains du malade.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir le sac en le tenant par le rabat "protège mains"
2. Vomir directement dans le sac
3. Après usage, tirer sur les liens et les nouer
4. Jeter dans les déchets ménagers (ne pas jeter aux toilettes)



COMPRESSES DE GAZE STÉRILES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 20 x 20 cm, 30 x 30 cm, 40 x 40 cm

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Sous emballage individuel stérile, elles sont destinées à nettoyer ou à désinfecter une peau lésée. Elles sont à utiliser en complément d'un nettoyant et assainissant cutané de type chlorhexidine.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir la compresse et :

Pour une protection : poser la sur la partie à protéger.
Fixer la à l'aide d'un sparadrap

Pour un nettoyage : pulvériser le produit sur l'endroit à nettoyer, ou sur la compresse, puis tamponner



PANSEMENT ABSORBANT STÉRILE EN NON TISSÉ 20 X 40 CM

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité

Ce pansement stérile permet l'absorption d'écoulements émanant d'une plaie. C'est un dispositif destiné à être utilisé dans le cadre de réalisation de pansement.

MODE D'EMPLOI

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Poser la compresse sur la zone à protéger
4. Enrouler une bande autour de la zone concernée
5. Accrocher la bande à l'aide d'un sparadrap, d'une épingle de sûreté, ou en la glissant sous elle-même



BANDES DE CRÊPE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)


Existent en 4 m x 5 cm, 4 m x 7 cm, 4 m x 10 cm

Sous emballage individuel, ces bandes permettent le maintien des compresses, des pansements. Elles permettent également de protéger les articulations.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap

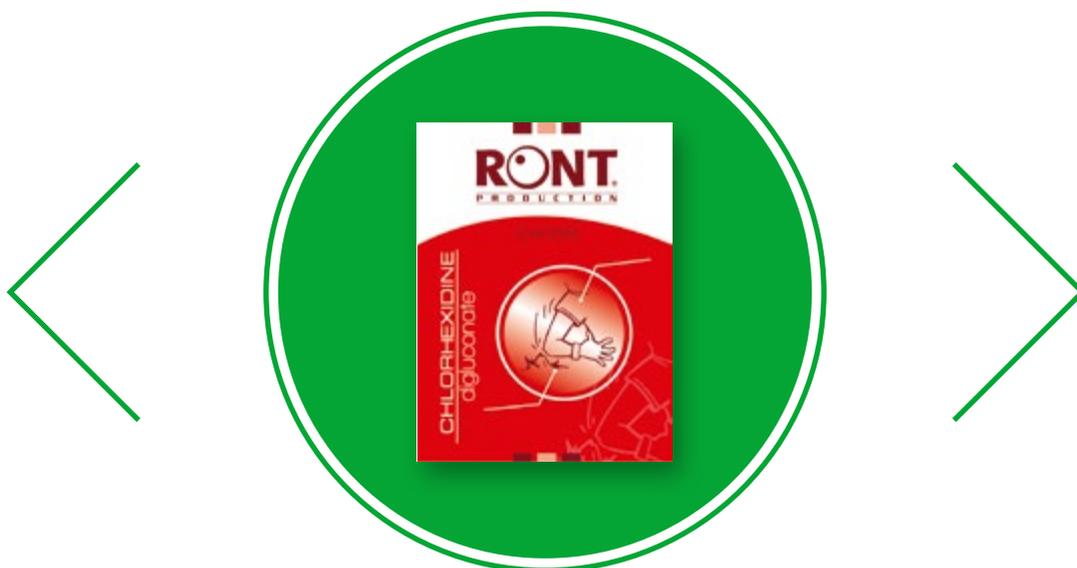

COMPRESSE IMPRÉGNÉE D'UNE SOLUTION À BASE DE CHLORHEXIDINE

(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Compresse douce imprégnée d'une solution nettoyante et assainissante cutanée à action immédiate. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter



PAIRE DE CISEAUX

Existent en 12 cm, en 15 cm

Ils permettent de découper les pansements, compresses, bandes. Ils peuvent être nettoyé et désinfecté avec une solution alcoolisée.



PAIRE DE GANTS JETABLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la protection du soigneur.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir les gants
3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées