



VANITY 4'CARE

Réf. TRO 4530 MOD

1'CARE COUPURES

- Pansements adhésifs
- Sachet stérile de 5 compresses en non tissé 7.5 x 7.5 cm
- Pansement compressif
- Lot de 2 mèches hémostatiques stériles
- Dosette de sérum physiologique stérile
- Pulvérisateur de 50 ml d'une solution à base de chlorhexidine

2'CARE BANDES & COMPRESSION

- Kit coussin hémostatique
- Bandes extensibles
- Bandes de crêpes
- Sparadrap

3'CARE URGENCES & ACCESSOIRES

- Couverture de survie
- Écharpe triangulaire
- Masque bouche à bouche
- Paire de ciseaux
- Pince à échardes
- Paire de gants jetables
- Comresse imprégnée de solution hydro-alcoolique
- Livret 1^{ers} soins

4'CARE COUPS, BRÛLURES & RINCE ŒIL

- Pack de froid instantané
 - Trio d'arnica
 - Dosette de sérum physiologique
 - Œillère operculée
 - Sachet d'eau gélifiée
 - Pansements "brûlure" stériles
-
- Garrot



PANSEMENTS ADHÉSIFS

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

**Existent en 20 x 72 mm, 53 x 70 mm, 10 x 6 cm,
1 m x 6 cm, "Bouts de doigts"**

Sous emballage individuel, ils contiennent une compresse non adhérente à la plaie fixée sur une base non tissé multi extensible. Ils permettent la protection des petites plaies, préalablement nettoyées ou désinfectées.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Enlever les protections plastiques
4. Apposer la compresse sur la partie à protéger
5. Fixer les 2 cotés adhésifs



SACHET STÉRILE DE 5 COMPRESSES EN NON TISSÉ 7.5 X 7.5 CM

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Emballées par 5 dans un sachet stérile, elles sont destinées à nettoyer ou à désinfecter une peau lésée. Elles sont à utiliser en complément d'un nettoyant et assainissant cutané de type chlorhexidine.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir la compresse et

Pour une protection : poser la sur la partie à protéger.
Fixer la à l'aide d'un sparadrap

Pour un nettoyage : pulvériser le produit sur l'endroit à nettoyer, ou sur la compresse, puis tamponner



PANSEMENT COMPRESSIF STÉRILE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Conditionné individuellement sous emballage stérile, ce pansement se compose d'une compresse non adhérente de 8 cm x 10 cm, cousue sur une bande extensible.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement compressif
3. Le dérouler jusqu'à l'apparition de la compresse
4. Poser la compresse sur la zone à protéger
5. Enrouler la bande autour du membre concerné
6. Accrocher la bande à l'aide d'un sparadrap, d'une épingle de sûreté, ou en la glissant sous elle-même



LOT DE 2 MÈCHES HÉMOSTATIQUES STÉRILES COALGAN®

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Mèches hémostatiques et cicatrisantes composées de fibres d'alginate de calcium d'origine végétale

Produit stérile, à usage unique, à jeter après usage. Toujours utiliser dans son intégralité.

Information complète sur la notice incluse

MODE D'EMPLOI :

Saignements de nez :

1. Ouvrir l'emballage
2. Torsader la mèche et l'humidifier avec du sérum physiologique pour faciliter l'introduction dans la narine
3. Insérer dans la narine et pincer les 2 narines pendant 10 minutes
4. Laisser Coalgan® en place au moins 30 min et au max 24 h
5. Utiliser le sachet pour jeter la mèche

Plaies cutanées :

1. Nettoyer la plaie avec du sérum physiologique
2. Ouvrir l'emballage
3. Appliquer Coalgan® sur la lésion
4. Retirer à l'arrêt du saignement ou laisser en place pour la cicatrisation et le retirer au max à 24 h
5. Utiliser le sachet pour jeter la mèche



DOSETTE DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Dosette de 5 ml de sérum physiologique destiné aux lavages et aux rinçages des yeux, des plaies...

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Casser le haut de la dosette
2. Appliquer selon la méthode :

En complément d'une œillère : Verser le contenu de la dosette dans l'œillère puis rincer l'œil

Sans œillère, verser directement le contenu de la dosette sur l'endroit à traiter



PULVÉRISATEUR DE 50 ML D'UNE SOLUTION À BASE DE CHLORHEXIDINE

(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Solution nettoyante et assainissante cutanée à action immédiate. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Contenu pouvant réaliser jusqu'à 300 applications.

MODE D'EMPLOI :

1. Enlever le capuchon
2. Pulvériser directement sur l'endroit à traiter
3. Enlever l'excédent avec une compresse



KIT COUSSIN HÉMOSTATIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Contenant un coussin, cousu sur une bande élastique de contention, ainsi qu'une paire de gants, ce produit est destiné à se substituer à la compression manuelle. Il permet d'arrêter une hémorragie.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer l'emballage et mettre les gants avant de pratiquer la pose du coussin
2. Dérouler la bande et poser la compresse sur la plaie
3. Enrouler la bande autour du membre
4. Fixer la grâce au système de fixation auto adhésif



BANDES EXTENSIBLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 3 m x 5 cm, 3 m x 7 cm, 3 m x 10 cm

Sous emballage individuel, ces bandes permettent le maintien des compresses, des pansements. Elles permettent également de protéger les articulations.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap



BANDES DE CRÊPE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)


Existent en 4 m x 5 cm, 4 m x 7 cm, 4 m x 10 cm

Sous emballage individuel, ces bandes permettent le maintien des compresses, des pansements. Elles permettent également de protéger les articulations.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap

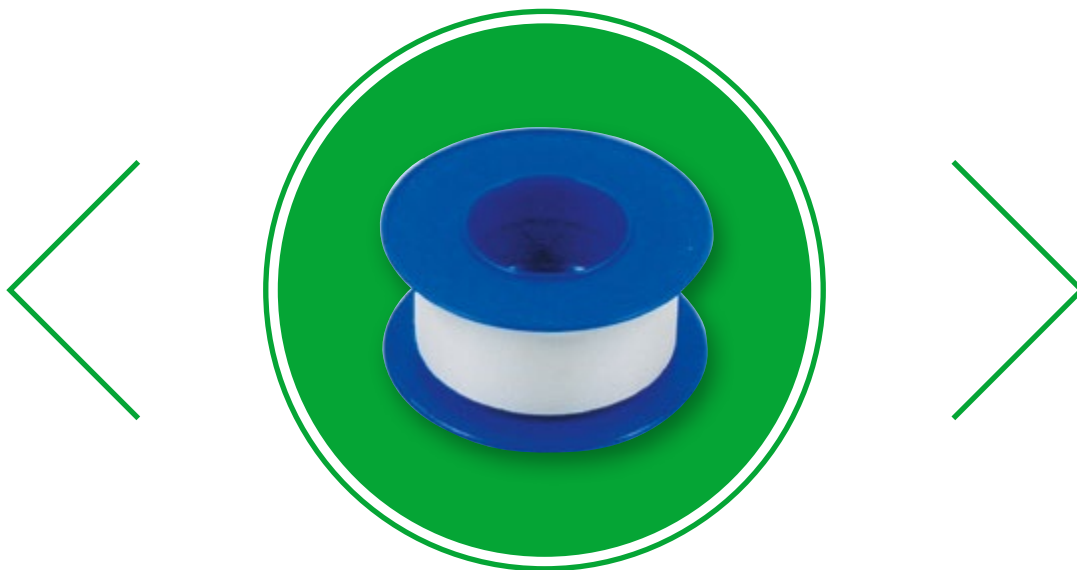

SPARADRAP

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Rouleau de sparadrap hypoallergénique de 5 m x 2 cm.

Sécable, il se découpe sans ciseaux.

MODE D'EMPLOI :

1. Dérouler la longueur nécessaire
2. Couper la aux ciseaux, ou à la main
3. Apposer à l'endroit désiré



COUVERTURE DE SURVIE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, cette couverture, réalisée en polyester métallisé, protège de la chaleur (coté argenté à l'extérieur) et du froid (coté doré à l'extérieur).

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

Sortir la couverture de son emballage et envelopper la personne :

- Dans le coté doré (argenté vers l'extérieur) pour la protéger de la chaleur
- Dans le coté argenté (doré vers l'extérieur) pour la protéger du froid



ÉCHARPE TRIANGULAIRE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, elle permet de soutenir un bras blessé, ou d'emballer toute partie du corps.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

Sortir l'écharpe de son emballage et la déplier

1. Glisser l'écharpe entre l'avant bras et le coude tout en laissant un bout sur l'épaule
2. Relever l'autre bout de l'écharpe sur l'autre épaule
3. Rassembler par un nœud plat autour du cou ou fixer la avec une épingle de sûreté



MASQUE BOUCHE À BOUCHE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballé individuellement, ce masque, à usage unique, permet de réaliser, grâce à sa valve anti retour, la technique du bouche à bouche dans des conditions d'hygiène optimales.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

Sortir le masque de son emballage


1. Tenir la tête de la victime en arriere et vérifier si le patient respire
2. Insérer la valve entre les dents de la victime
3. Pincer le nez de la victime, introduire de l'air et contrôler si la poitrine se lève
4. Laisser la victime expirer, et répéter l'opération immédiatement 3 fois et ensuite toutes les 4 secondes



PAIRE DE CISEAUX

Existent en 12 cm, en 15 cm

Ils permettent de découper les pansements, compresses, bandes. Ils peuvent être nettoyé et désinfecté avec une solution alcoolisée.

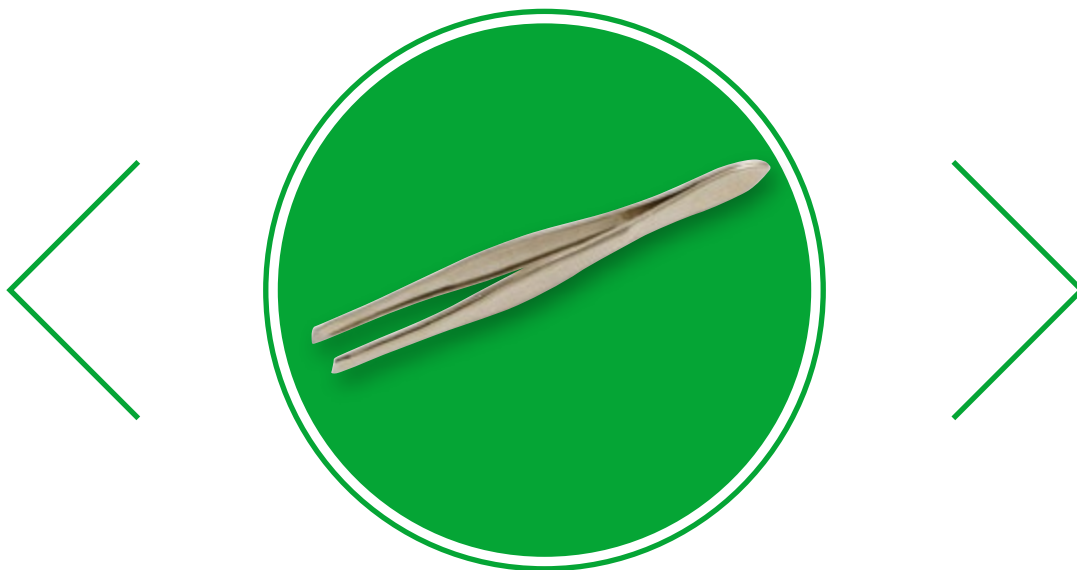

PINCE À ÉCHARDES

Permet d'enlever tous types de corps étrangers : écharde, petits copeaux de verre, de métal, qui se seraient introduit sous la peau. Elle peut être nettoyée et désinfectée avec une solution alcoolisée.



PAIRE DE GANTS JETABLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la protection du soigneur.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir les gants
3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées



COMPRESSE IMPRÉGNÉE DE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Compresse douce imprégnée d'une solution hydro-alcoolique destinée à la désinfection des mains avant un soin. Incolore.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Se nettoyer les mains



LIVRET 1^{ers} SOINS

Ce livret, en 10 langues, permet de savoir ce qu'il faut faire en cas d'urgence, et contient tous les numéros utiles.



PACK DE FROID INSTANTANÉ

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Ce pack de froid permet d'obtenir très rapidement (par simple pression) une compresse froide pour soulager les douleurs dues aux coups. Il permet également de procurer le froid nécessaire à la conservation dans les meilleures conditions, un membre sectionné. (en complément de la pochette isotherme à 3 compartiments).

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Presser le sachet en son milieu afin de casser la bulle incluse
2. Agiter le sachet afin de mélanger le contenu
3. Utilisation pour :
 - Cryothérapie cutanée : Appliquer sur la partie intéressée
 - Maintien au froid d'un membre coupé : Insérer le pack dans un des 2 compartiments extérieurs de la pochette isotherme



TRIO D'ARNICA

Trio de 0.8 ml de crème à l'arnica destiné à apaiser les coups et chocs.

La texture, non grasse, pénètre rapidement.

MODE D'EMPLOI :

1. Détacher un sachet
2. L'ouvrir selon les pointillés
3. Appliquer en fine couche sur l'endroit à apaiser
4. Masser pour faire pénétrer
5. Renouveler l'opération si nécessaire



DOSETTE DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Dosette de 5 ml de sérum physiologique destiné aux lavages et aux rinçages des yeux, des plaies...

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Casser le haut de la dosette
2. Appliquer selon la méthode :

En complément d'une œillère : Verser le contenu de la dosette dans l'œillère puis rincer l'œil

Sans œillère, verser directement le contenu de la dosette sur l'endroit à traiter



ŒILLÈRE OPERCULÉE

Cupule adaptée à une dosette de 5 ml de sérum physiologique, l'opercule en aluminium, scellé, permet de protéger l'œillère de la poussière avant usage.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Verser le contenu d'une dosette de sérum physiologique de 5 ml
3. Rincer l'œil



SACHET D'EAU GÉLIFIÉE

Destiné à remplacer l'eau en cas de brûlure, ce gel à base d'eau purifiée hydrate les couches supérieures de la peau. Cohésif, sa viscosité l'empêche de couler. Son système de distribution inversé et son goulot central, permettent une application précise, d'une seule main. Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet en suivant les pointillés
2. Appuyer sur le sachet pour faire sortir le gel
3. Appliquer sur l'endroit à apaiser



PANSEMENTS “BRÛLURE” STÉRILES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 5 x 7 cm, 10 x 7 cm

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Compresse constituée d'une trame imprégnée de particules hydrocolloïdes et de vaseline, fixé sur un pansement adhésif en non tissé. Il est destiné aux soins des brûlures du second degré, et des blessures superficielles. Il soulage la douleur et favorise la cicatrisation. Les retraits sont indolores.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Enlever les protections
4. Apposer la compresse sur la partie à protéger
5. Fixer les 2 cotés adhésifs



GARROT

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Très simple d'utilisation, ce garrot tourniquet réutilisable, est un matériel d'urgence indispensable, utilisé pour arrêter une hémorragie externe. Il est destiné à interrompre la circulation du sang dans un membre supérieur (bras, avant-bras, main) ou membre inférieur (cuisse, jambe, pied).

MODE D'EMPLOI

1. Appliquer le garrot à proximité de la zone de saignement et placer le membre blessé à travers de la boucle.
2. Tirer la bande très serrée et fixer-la sur elle-même.
3. Coller la bande autour du membre.
4. Tourner la tige jusqu'à ce que le saignement s'arrête.
5. Placer la tige à l'intérieur du clip et verrouiller.
6. Vérifier l'état de saignement, appliquer un serrage supplémentaire à côté de garrot et réévaluer si le saignement persiste.
7. Coller la bande sur la tige à l'intérieur du clip autour du membre
8. Sécuriser la tige et la bande avec la sangle, transporter, réévaluer, enregistrer le temps appliqué sur la sangle blanche si possible.