



# VALISE DE SECOURS NAVIRE DE PLAISANCE

Réf. VAL 1750 PP

- Kit coussin hémostatique
- Couverture de survie
- Pansements adhésifs
- Sachet stérile de 5 compresses en non tissé 7.5 x 7.5 cm
- Bandes de crêpe
- Bandes cohésives
- Sparadrap
- Paire de gants jetables
- Compresse imprégnée de solution à base de chlorhexidine
- Gel hydro alcoolique
- Livret 1<sup>ers</sup> soins



## KIT COUSSIN HÉMOSTATIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Contenant un coussin, cousu sur une bande élastique de contention, ainsi qu'une paire de gants, ce produit est destiné à se substituer à la compression manuelle. Il permet d'arrêter une hémorragie.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer l'emballage et mettre les gants avant de pratiquer la pose du coussin
2. Dérouler la bande et poser la compresse sur la plaie
3. Enrouler la bande autour du membre
4. Fixer la grâce au système de fixation auto adhésif



## COUVERTURE DE SURVIE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, cette couverture, réalisée en polyester métallisé, protège de la chaleur (coté argenté à l'extérieur) et du froid (coté doré à l'extérieur).

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

Sortir la couverture de son emballage et envelopper la personne :

- Dans le coté doré (argenté vers l'extérieur) pour la protéger de la chaleur
- Dans le coté argenté (doré vers l'extérieur) pour la protéger du froid



## PANSEMENTS ADHÉSIFS

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

**Existent en 20 x 72 mm, 53 x 70 mm, 10 x 6 cm,  
1 m x 6 cm, "Bouts de doigts"**

Sous emballage individuel, ils contiennent une compresse non adhérente à la plaie fixée sur une base non tissé multi extensible. Ils permettent la protection des petites plaies, préalablement nettoyées ou désinfectées.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Enlever les protections plastiques
4. Apposer la compresse sur la partie à protéger
5. Fixer les 2 cotés adhésifs



## **SACHET STÉRILE DE 5 COMPRESSES EN NON TISSÉ 7.5 X 7.5 CM**

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Emballées par 5 dans un sachet stérile, elles sont destinées à nettoyer ou à désinfecter une peau lésée. Elles sont à utiliser en complément d'un nettoyant et assainissant cutané de type chlorhexidine.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### **MODE D'EMPLOI :**

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir la compresse et

Pour une protection : poser la sur la partie à protéger.  
Fixer la à l'aide d'un sparadrap

Pour un nettoyage : pulvériser le produit sur l'endroit à nettoyer, ou sur la compresse, puis tamponner



## BANDES DE CRÊPE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

**Existent en 4 m x 5 cm, 4 m x 7 cm, 4 m x 10 cm**

Sous emballage individuel, ces bandes permettent le maintien des compresses, des pansements. Elles permettent également de protéger les articulations.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap



## BANDES COHÉSIVES

(Produit CE soumis à obligation de traçabilité)


**Existe en 4.5 m x 2.5 cm, 4.5 m x 5 cm,  
4.5 m x 7.5 cm, 4.5 m x 10 cm**

Bande élastique auto-adhérente (elle adhère uniquement sur elle-même et non sur la peau. Elle est utilisée pour une immobilisation active (entorse, élongation).

Elle se découpe sans ciseaux et est repositionnable.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et l'appliquer sur l'endroit à protéger
3. Fixer la bande sur elle-même

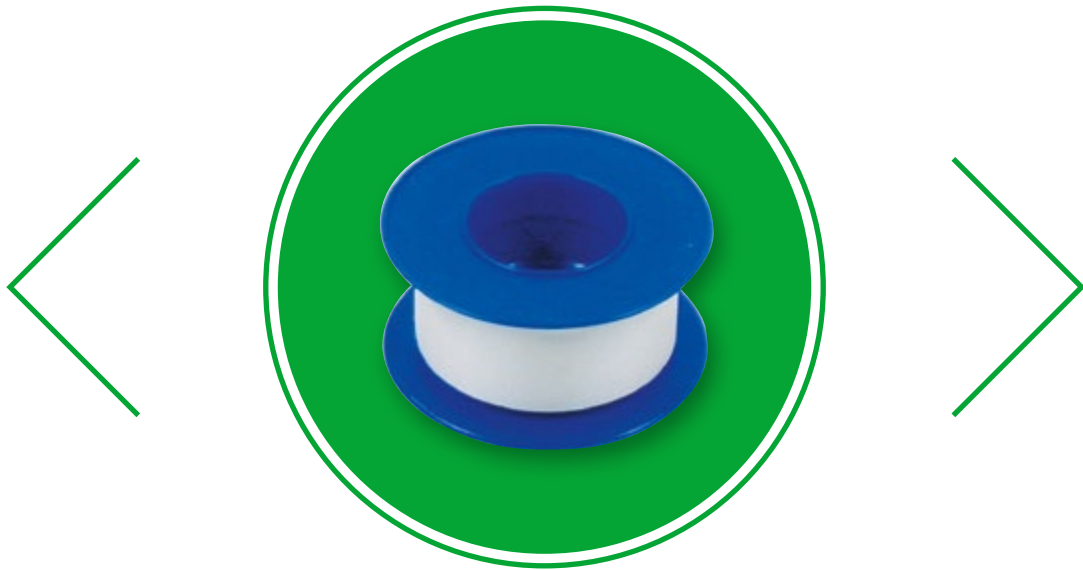

## SPARADRAP

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Rouleau de sparadrap hypoallergénique de 5 m x 2 cm.

Sécable, il se découpe sans ciseaux.

### MODE D'EMPLOI :

1. Dérouler la longueur nécessaire
2. Couper la aux ciseaux, ou à la main
3. Apposer à l'endroit désiré



## PAIRE DE GANTS JETABLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la protection du soigneur.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir les gants
3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées



## COMPRESSE IMPRÉGNÉE D'UNE SOLUTION À BASE DE CHLORHEXIDINE

(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Compresse douce imprégnée d'une solution nettoyante et assainissante cutanée à action immédiate. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

### MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter



## GEL HYDRO ALCOOLIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

**Existe en flacon de 100 ml et en 300 ml avec pompe**

Ce gel hydroalcoolique est conçu pour le traitement hygiénique sans eau des mains saines par simple friction. Activité bactéricide, fongicide et virucide

Il contient des agents hydratants qui aident à garder une peau saine et élimine jusqu'à 99.999% des germes les plus courants qui peuvent être nocifs

Bonne tolérance cutanée - Non sensibilisant - Sans colorant, sans parfum

### MODE D'EMPLOI

1. Sur mains propres et sèches, appliquer la dose requise pour la friction
2. Frictionner les mains, poignets, autour des ongles et entre les doigts pendant au moins 30 secondes jusqu'à séchage complet
3. Ne pas rincer, laisser sécher



## LIVRET 1<sup>ers</sup> SOINS

Ce livret, en 10 langues, permet de savoir ce qu'il faut faire en cas d'urgence, et contient tous les numéros utiles.