



### Detectaplast®



# Compresses stériles imprégnées D'Hydrogel

## Gamme Spécifiques

**RÉFÉRENCE : COM 9302 BR**  
**FORMAT 10 X 10 CM**

Gencod : 5407006144052

**RÉFÉRENCE : COM 9303 BR**  
**FORMAT 20 X 20 CM**

Gencod : 5407006144069

**RÉFÉRENCE : COM 9304 BR**  
**FORMAT 30 X 40 CM**

Gencod : 5407006144076

### Detectaplast®



### Detectaplast®



Dispositif Médical de classe I, conforme au règlement européen 2017/745 soumis à obligation de traçabilité.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.

## ARTICLE

### DESCRIPTION

Ces compresses stériles sont imprégnées d'un gel anti-brûlure hydratant, à base d'eau, soluble dans l'eau, qui évacue la chaleur d'une brûlure tout en soulageant la douleur, en refroidissant la peau et en protégeant contre la contamination par l'air.

En appliquant ces compresses dès que possible, la chaleur de la brûlure est dissipée, ce qui aide à empêcher la chaleur de progresser plus profondément dans la peau.

Le gel d'imprégnation est composé à 90 % d'eau purifiée et a le même effet rafraîchissant que l'eau, mais comme il est épais, il reste sur la brûlure et s'évapore à un rythme très lent.

Tout résidu de gel sur une plaie brûlée sera éliminé au contact de l'eau.

### FORMATS DISPONIBLES

Sachet d'une compresse 10 x 10 cm

Sachet d'une compresse 20 x 20 cm

Sachet d'une compresse 30 x 40 cm

### UTILISATION

Déchirer le sachet de Detectaplast Burn Care et le placer sur le site de la plaie, puis presser le reste du gel du sachet de manière uniforme sur le pansement.  
Laisser le pansement sur la peau affectée pendant au moins 30 minutes.  
Si nécessaire, fixer le avec un pansement perméable à l'air.  
Veiller à ne pas exercer une pression trop forte.  
Toujours consulter un médecin si la brûlure est grave ou couvre une grande surface.  
Le gel Detectaplast Burn Care est soluble et peut être rincé avec du sérum physiologique ou de l'eau stérile si nécessaire