



## Echarpe triangulaire

■ Gamme **Urgence & Accessoires**

**RÉFÉRENCE : ECH 6071 TR**

### DESCRIPTION

- Echarpe triangulaire en non tissé.

Elle permet de soutenir un bras blessé ou de maintenir toutes autres parties du corps. Elle est emballée individuellement avec mode d'emploi.

**TRIANGLE POUR ÉCHARPE**  
RÉF. ECH 6071 TR



**A - Elles permettent de soutenir un bras blessé.**

- 1) Glisser l'écharpe entre l'avant-bras et le coude tout en laissant un bout sur l'épaule.
- 2) Relever l'autre bout de l'écharpe sur l'autre épaule et rassembler par un nœud plat autour du cou.



**B - Elles permettent d'emballer toute partie du corps.**  
Thorax, coude, jambe, main,...

CE

FARMOR - Parc de l'Esplanade - 16, rue Paul Henri Spaak  
77400 Saint Thibault-des-Vignes - FRANCE  
Tél. : 01 60 31 59 59 - Fax : 01 60 07 56 31  
www.ifarmor.com - www.reflex-premiers-secours.com

3 760098 250714

Dispositif Médical de classe I, conforme au règlement européen 2017/745 soumis à obligation de traçabilité.

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.