



TROUSSE DE SECOURS

RANDO

Réf. TRO 7010 FLR

- Couverture de survie
- Pansements adhésifs
- Pansement "ampoules" spécial talon
- Sachet stérile de 5 compresses en non tissé 7.5 x 7.5 cm
- Sutures adhésives
- Bandes extensibles
- Paire de ciseaux
- Pince à échardes
- Paire de gants jetables
- Lot de 3 pinces à tiques
- Compresse imprégnée de solution à base de chlorhexidine
- Compresse imprégnée d'une solution apaisante moustique
- Compresse imprégnée de solution hydro-alcoolique
- Trio d'arnica
- Sachet d'eau gélifiée
- Dosette de sérum physiologique stérile
- Sac plastique
- Livret 1^{ers} soins



COUVERTURE DE SURVIE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Emballée individuellement, cette couverture, réalisée en polyester métallisé, protège de la chaleur (coté argenté à l'extérieur) et du froid (coté doré à l'extérieur).

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

Sortir la couverture de son emballage et envelopper la personne :

- Dans le coté doré (argenté vers l'extérieur) pour la protéger de la chaleur
- Dans le coté argenté (doré vers l'extérieur) pour la protéger du froid



PANSEMENTS ADHÉSIFS

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

**Existent en 20 x 72 mm, 53 x 70 mm, 10 x 6 cm,
1 m x 6 cm, "Bouts de doigts"**

Sous emballage individuel, ils contiennent une compresse non adhérente à la plaie fixée sur une base non tissé multi extensible. Ils permettent la protection des petites plaies, préalablement nettoyées ou désinfectées.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Enlever les protections plastiques
4. Apposer la compresse sur la partie à protéger
5. Fixer les 2 cotés adhésifs



PANSEMENT “AMPOULES” SPÉCIAL TALON

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Ces pansements ampoules hydro colloïdes agissent comme une seconde peau

Ils forment un gel de protection dermo-reconstituant qui isole la plaie des frottements et favorisent la cicatrisation de l'ampoule.

Ultra résistant à l'eau, ils sont adaptés à la forme du talon.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement
3. Enlever la protection
4. Apposer le pansement sur l'ampoule



PANSEMENT COMPRESSIF STÉRILE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Conditionné individuellement sous emballage stérile, ce pansement se compose d'une compresse non adhérente de 8 cm x 10 cm, cousue sur une bande extensible.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir le pansement compressif
3. Le dérouler jusqu'à l'apparition de la compresse
4. Poser la compresse sur la zone à protéger
5. Enrouler la bande autour du membre concerné
6. Accrocher la bande à l'aide d'un sparadrap, d'une épingle de sûreté, ou en la glissant sous elle-même



SACHET STÉRILE DE 5 COMPRESSES EN NON TISSÉ 7.5 X 7.5 CM

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Emballées par 5 dans un sachet stérile, elles sont destinées à nettoyer ou à désinfecter une peau lésée. Elles sont à utiliser en complément d'un nettoyant et assainissant cutané de type chlorhexidine.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage pelable
2. Saisir la compresse et

Pour une protection : poser la sur la partie à protéger.
Fixer la à l'aide d'un sparadrap

Pour un nettoyage : pulvériser le produit sur l'endroit à nettoyer, ou sur la compresse, puis tamponner



SUTURES ADHÉSIVES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Sachet stérile de 5 bandelettes adhésives blanches permettant de refermer de façon rapide et efficace les petites plaies superficielles.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Nettoyer et sécher soigneusement la plaie pour une adhérence optimale
2. Appliquer 2 bandelettes de part et d'autre de la plaie parallèlement à celle-ci
3. Appliquer la 3^{ème} perpendiculairement sur une berge de la plaie et sous légère traction, l'appliquer sur la berge opposée pour assurer un rapprochement parfait. Veiller à bien coller les berges de la plaie sans laisser d'espace ni chevauchement
4. Appliquer les bandelettes suivantes de la même manière jusqu'à la fermeture complète de la plaie
5. Terminer le montage en posant 2 bandelettes transversalement pour renforcer l'ensemble



BANDES EXTENSIBLES

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Existent en 3 m x 5 cm, 3 m x 7 cm, 3 m x 10 cm

Sous emballage individuel, ces bandes permettent le maintien des compresses, des pansements. Elles permettent également de protéger les articulations.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :


1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir la bande et poser la sur la partie à protéger
3. Fixer la à l'aide d'un sparadrap



PAIRE DE CISEAUX

Existent en 12 cm, en 15 cm

Ils permettent de découper les pansements, compresses, bandes. Ils peuvent être nettoyé et désinfecté avec une solution alcoolisée.

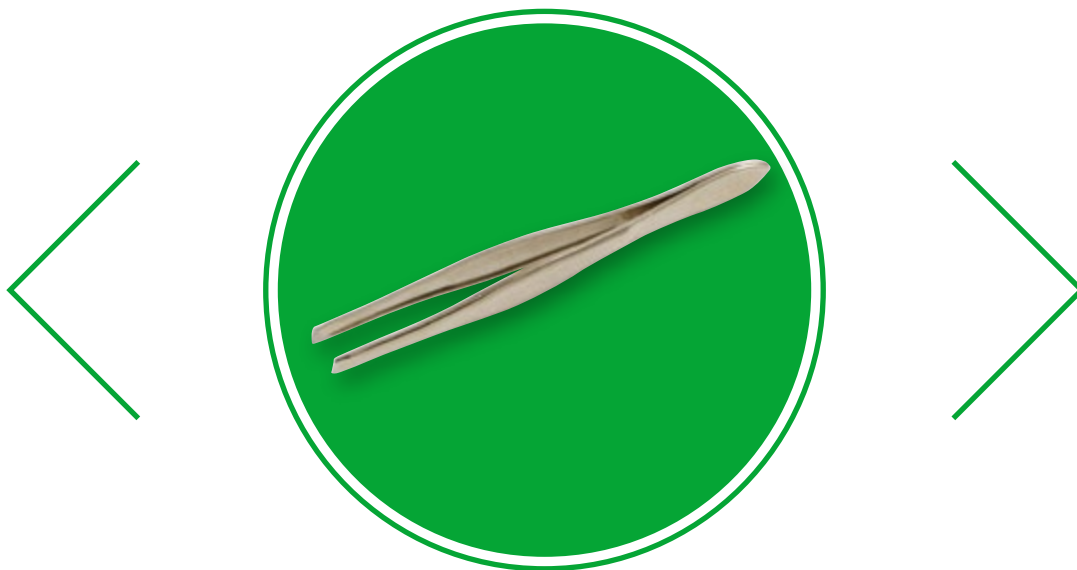

PINCE À ÉCHARDES

Permet d'enlever tous types de corps étrangers : écharde, petits copeaux de verre, de métal, qui se seraient introduit sous la peau. Elle peut être nettoyée et désinfectée avec une solution alcoolisée.



PAIRE DE GANTS JETABLES


(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

En sachet individuel et de taille unique, il permet la protection du soigneur.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir l'emballage
2. Saisir les gants
3. Les enfiler sur mains préalablement nettoyées

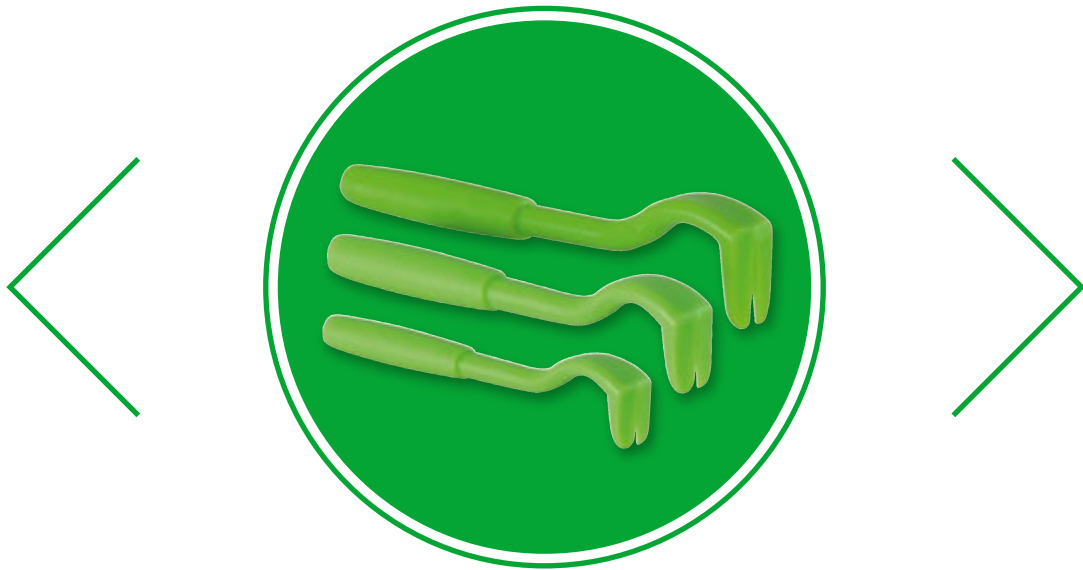

LOT DE 3 PINCES À TIQUES

Permet de retirer les tiques complètement de manière efficace et sans douleur, sur les animaux et les hommes

Elle peut être nettoyée et désinfectée avec une solution alcoolisée.

MODE D'EMPLOI :

1. Insérer le crochet sous le corps de la tique
2. Ne pas tirer, mais **TOURNER** jusqu'à ce que la tique se détache



COMPRESSE IMPRÉGNÉE D'UNE SOLUTION À BASE DE CHLORHEXIDINE

(produit biocide: utilisez les produits biocides avec précaution)

Compresse douce imprégnée d'une solution nettoyante et assainissante cutanée à action immédiate. Inodore, incolore, et sans alcool, elle ne pique pas.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter



COMPRESSE IMPRÉGNÉE D'UNE SOLUTION APAISANTE MOUSTIQUE

Compresse douce imprégnée d'une solution apaisante après pique d'insectes.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Appliquer sur l'endroit à traiter



COMPRESSE IMPRÉGNÉE DE SOLUTION HYDRO-ALCOOLIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Compresse douce imprégnée d'une solution hydro-alcoolique destinée à la désinfection des mains avant un soin. Incolore.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet
2. Saisir la compresse imprégnée
3. Se nettoyer les mains



TRIO D'ARNICA

Trio de 0.8 ml de crème à l'arnica destiné à apaiser les coups et chocs.

La texture, non grasse, pénètre rapidement.

MODE D'EMPLOI :

1. Détacher un sachet
2. L'ouvrir selon les pointillés
3. Appliquer en fine couche sur l'endroit à apaiser
4. Masser pour faire pénétrer
5. Renouveler l'opération si nécessaire



SACHET D'EAU GÉLIFIÉE

Destiné à remplacer l'eau en cas de brûlure, ce gel à base d'eau purifiée hydrate les couches supérieures de la peau. Cohésif, sa viscosité l'empêche de couler. Son système de distribution inversé et son goulot central, permettent une application précise, d'une seule main. Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Déchirer le sachet en suivant les pointillés
2. Appuyer sur le sachet pour faire sortir le gel
3. Appliquer sur l'endroit à apaiser



DOSETTE DE SÉRUM PHYSIOLOGIQUE

(produit CE soumis à obligation de traçabilité)

Vérifier l'intégralité du protecteur individuel de stérilité.

Dosette de 5 ml de sérum physiologique destiné aux lavages et aux rinçages des yeux, des plaies...

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Casser le haut de la dosette
2. Appliquer selon la méthode :

En complément d'une œillère : Verser le contenu de la dosette dans l'œillère puis rincer l'œil

Sans œillère, verser directement le contenu de la dosette sur l'endroit à traiter



SAC PLASTIQUE

Permet de récupérer le matériel souillé.

Produit à usage unique, à jeter après usage.

MODE D'EMPLOI :

1. Ouvrir le sac et y déposer le matériel souillé
2. Refermer le sachet en le zippant



LIVRET 1^{ers} SOINS

Ce livret, en 10 langues, permet de savoir ce qu'il faut faire en cas d'urgence, et contient tous les numéros utiles.