



Diphotérine de PREVOR ®

■ Gamme **Spécifiques**

RÉFÉRENCE : LIS 1520 DI

ARTICLE

DESCRIPTION

• Dispositif de premiers secours, la Diphotérine est destinée aux rinçages des projections chimiques oculaires et cutanés, elle stoppe l'action du produit chimique et l'enlève même en profondeur. Elle a également un effet antalgique.
La solution est active sur tous les produits chimiques (acides, bases, oxydants, réducteurs, alkylants et solvants) sauf acide fluorhydrique.

CONTENANCE

50 ml

UTILISATION ET MODE D'EMPLOI

Permet le lavage oculaire dans les 10 secondes après l'accident. Il est muni d'une œillère ergonomique et fourni avec un étui ceinture.

Usage externe

Flacon à usage unique - Œillère ergonomique stérilisée

Pour une efficacité optimale, il est recommandé, dans les 60 secondes après la projection :

- La mise en service des flacons de 500 ml pour les projections oculaires : le contenu du flacon doit être entièrement utilisé sur l'œil touché.
- La mise en service des aérosols pour les projections cutanées, leur contenu doit être entièrement utilisé sur le visage ou sur le bras.

Le flacon d'Afterwash II, contenu dans la station, permet le rééquilibrage physiologique de l'œil et diminue les sensations désagréables dues à la projection chimique.

Se porte à la ceinture

ATTENTION, Ne peut être revendu hors France

Les informations contenues dans cette notice sont l'expression la plus exacte et la plus précise possible de nos connaissances actuelles. Elles ne sont données toutefois qu'à titre indicatif. Ces informations ne sauraient impliquer une garantie de notre part.